

Instrucciones de implantación y lectura de microchips



DATAMARS
AnimaliD

Procedimiento de correcta implantación



Claves para un escaneo efectivo



- Mantenga el escáner cerca o tocando a la mascota.
- Escanee lenta y pacientemente.
- Mueva el escáner ligeramente hacia adelante y hacia atrás mientras escanea porque los chips implantados están en varias orientaciones.
- Comience y concentre la exploración en la cara cráneo-dorsal de la mascota.
- Escanee en un patrón "S" horizontal y luego vertical hacia abajo de la mascota como se muestra en el diagrama.
- Considere escanear cada mascota más de una vez

Sitios de implantación recomendados



Perros y gatos:
Existen dos lugares de inyección estandarizados para la implantación de microchips en perros y gatos:
- Subcutáneamente en la línea media dorsal, justo craneal a las escápulas.
- En el lado izquierdo del cuello, por vía subcutánea en la región media.



Peces:
Implantar el microchip en la línea media, craneal a la aleta dorsal.



Equinos:
Implantar el chip en el lado izquierdo del animal, en el tercio medio del cuello, 3-4 cm por debajo de la crin. Desinfecte y prepare el sitio asépticamente, como para cualquier procedimiento quirúrgico. Inserte la aguja hasta su máxima profundidad por debajo del ligamento nucal, en un ángulo de 90° con respecto al cuello. Aplique presión digital en el sitio del implante mientras retira la aguja. Por lo general, no es necesario utilizar sedación o anestesia local; sin embargo, es posible que sea necesario considerarlo, dependiendo de la edad y el temperamento de cada animal.



Aves:
Implantar el microchip en el músculo pectoral izquierdo. Se pueden colocar microchips en el ave consciente si el cuidador confía en que la sujeción será eficaz.
De lo contrario, se puede considerar la anestesia general para permitir la colocación correcta del chip y reducir el traumatismo del ave. Inyecte el chip 1 cm lateral a la quilla y 1 cm craneal al borde caudal de la quilla.



Lagartos:
Para la mayoría de las especies, implante el chip en el músculo cuádriceps izquierdo o por vía subcutánea sobre esta área.
Para lagartos muy pequeños, implantarlo por vía subcutánea en el lado izquierdo del cuerpo.



Serpientes:
Implantar el microchip en la nuca izquierda, por vía subcutánea al doble de la longitud de la cabeza desde la punta de la nariz.



Grandes mamíferos:
Implante el chip por vía subcutánea en la región izquierda del cuello medio.
Mamíferos medianos y pequeños:
Implantar el chip entre las escápulas.

NOTA:

Para los reptiles, se recomienda sellar todos los sitios de entrada de las agujas con pegamento para tejidos. Implante especies en hibernación varias semanas antes del final de su temporada activa, para permitir la curación antes de la hibernación.

DATAMARS AnimalID