

VALVULA UNIVERSAL PARA APLICADOR ORAL



¿Como instalarlo?


1



MATERIALES

- VALVULA UNIVERSAL
- TAPA DE MEDICAMENTO
- MECHA 7/8 PARA AGUJEROS

2

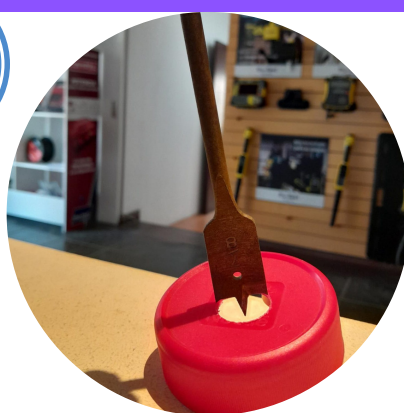

PROCEDIMIENTO

- AGUJEREAR LA TAPA DEL MEDICAMENTO EN LA PARTE CENTRAL CON LA MECHA 7/8

3

PROCEDIMIENTO

- DESENROSCAR EL SEGURO DE LA VALVULA UNIVERSAL
- COLOCAR LA VALVULA POR DEBAJO DE LA TAPA



4



PROCEDIMIENTO

- ENROSCAR EL SEGURO FIRMEMENTE

5



PROCEDIMIENTO

- COLOCAR TOMERA DE 20 ML FLUJO CONTINUO CON LA VALVULA UNIVERSAL
- PORCEDER A RELIZAR EL TRABAJO